

Załącznik nr 5 dla sprzętu medycznego z serii:

CS 3600 / CS 3700 / CS 3800

I. Przygotowanie do montażu

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji skanera CS 3600/3700/3800. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Typ skanera	Typ komputera / wymagania sprzętowe
Skaner CS 3600 CS 3700	PC stacjonarny: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 3060 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0
	Laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia GTX 3060 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0
Skaner CS 3800	PC stacjonarny: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 3070 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0 (na potrzeby adaptera WiFi)
	Laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 3070 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0 (na potrzeby adaptera WiFi)

Typ skanera	Typ komputera / wymagania sprzętowe
Skaner Shining Aoralscan 3	PC stacjonarny: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 3060 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0
	Laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. Kombinacja 240 GB SSD + 2TB HDD Karta graficzna ekran: min. Nvidia GTX 3060 1920x1080 OS: Windows 10 (wersja min 1809) 64bit; zalecana edycja Professional Port USB: USB 3.0

III. Sieć komputerowa

Aby możliwe było przeglądanie zdjęć na wszystkich komputerach w klinice, należy połączyć komputery w sieci. Ze względu na wielkość plików, w których zapisane są badania zalecana jest sieć Gigabit Ethernet (1Gb/s).

Nie zaleca się stosowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi jak również najstarsze sieci Ethernet 10Mb/s – w przypadku tego typu sieci mogą występować duże opóźnienia w otwieraniu zdjęć i wyświetlaniu listy pacjentów.

IV. Przyłącza do frezarek (w przypadku systemów z frezarką – punkt nie dotyczy umów zakupu samych skanerów wewnętrznych)

Do podłączenia frezarki wymagane jest podłączenie do suchego, czystego powietrza o wydajności min. 60 l/min. i ciśnieniu nie mniejszym niż 6 bar. Na czas instalacji wymagany jest internet.

PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

PODPIS KUPUJĄCEGO

.....

.....